

TRANSPARENT

- Keine Sichteinschränkung am Blutungspunkt
- Kann mehrfach aufgetragen werden

VIelfÄLTIG

- Kann in Kombination mit Clips, Koagulation etc. verwendet werden
- Auch an schwer zugänglichen Stellen leicht aufzutragen

EINFACH ZU VERWENDEN

- Vorbefüllte, einsatzbereite Spritze
- Keine weitere Vorbereitung erforderlich
- Keine Kontraindikationen




UNTERSUCHUNG
KANN NACH EINSATZ
VON PURASTAT®
FORTGESETZT
WERDEN



TRANSPARENT, VIelfÄLTIG, EINFACH


PURASTAT® HÄMOSTATIKUM

FUJIFILM
Value from Innovation

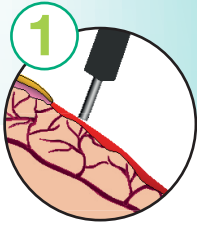


Schritt 1: Säubern

Entfernen Sie so viel Blut und Flüssigkeit wie möglich.

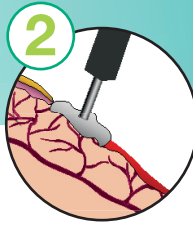

Schritt 2: Direkt

Tragen Sie PuraStat® direkt und so nah wie möglich an der Blutungsquelle auf die Läsion auf.

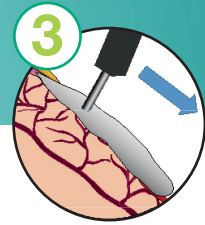

Schritt 3: Applizieren

Tragen Sie PuraStat® gleichmäßig, langsam und dünn auf die gesamte Resektionsoberfläche oder Blutungsquelle auf.

Produkt-Nr.	Bestell-Nr.	Eigenschaften	VE
PuraStat® 1ml 621-034	70100152373	Hämostatikum 1 ml Spritze	1
PuraStat® 3ml 621-035	70100152372	Hämostatikum 3 ml Spritze	1
PuraStat® 5ml 621-036	70100152371	Hämostatikum 5 ml Spritze	1
PuraStat® Nozzle System Type-E	70100145376	Applikationssystem, endoskopisch	5

PuraStat® ist ein eingetragenes Trademark von 3-D Matrix.

Anwendungsgebiet	OPS Kennziffer	Beschreibung
Ösophagus	5-429.v	Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen
	5-429.v1	Peptid-Hydrogel bildend
Magen	5-449.v	Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen
	5-449.v3	Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen: Endoskopisch
Dünn- und Dickdarm	5-469.w	Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen
	5-469.w3	Blutstillung durch Auftragen von Peptid-Hydrogel bildenden Substanzen: Endoskopisch
Rektum	5-489.k	Endoskopische Blutstillung durch Auftragen von Substanzen
	5-489.k1	Peptid-Hydrogel bildend

Weitere Informationen zu PuraStat® erhalten Sie von Ihrem zuständigen Außendienstmitarbeiter oder über den folgenden QR-Code



Bestellungen erfolgen direkt über unseren Sales Support Endoscopy
 customersupport-dx_feg@fujifilm.com
 Tel: +49 (0)2102 5364 9103
 Fax: +49 (0)2102 5364 8700

FUJIFILM
 Value from Innovation